



# *Avicenum*

Medizinische Kompression mit Extras

... für ein leichteres Leben!

*Aries*  
MEDICAL PRODUCTS

## GRUßWORT DES GENERALDIREKTORS DER ARIES HOLDING

*Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,  
Sie halten gerade den neuen Katalog unserer medizinischen Produktreihe Avicenum in Händen. Im Portfolio unserer Marke Avicenum finden Sie Kompressionsprodukte die zur Vorbeugung und Heilung von Krampfadern und Beinschwellungen entwickelt wurden. Des Weiteren finden Sie hier auch Produkte zur Behandlung von lymphatischen Schwellungen und Socken zur gezielten diabetischen Prophylaxe.*

*Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir eine ganze Menge innovativer Elemente in unsere Produkte einfließen lassen, die aus Anregungen und Beratungen mit Fachärzten resultieren, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir schätzen diese Anregungen und Impulse seitens unserer Kunden und Partner sehr und es bleibt auch weiterhin Priorität in unserem Haus Hinweise unserer Kunden zu hören und zu beachten.*

*Wir werden auch in diesem Jahr eine ganze Menge innovativer Ideen die daraus resultieren verwirklichen. Dank unserer eigenen Entwicklungsabteilung haben wir damit die Möglichkeit sehr schnell und flexibel Verbesserungen in unsere Produkte einfließen zu lassen. Zu den Innovationen der vergangenen Jahre zählte beispielsweise die Einführung spezieller „Minus-“ und „Ultrakurzer-“ Größen bei Produkten der Kompressionsklasse II und die Einarbeitung einer sogenannten „Safe-Compression-Zone“ im Mittelfußbereich bei Produkten der Kompressionsklasse III. Als Neuheit gibt es die luftigen Schenkelstrümpfe Avicenum 360 FINE mit allen Funktionen der Kompressionsklasse II. Auch dazu wurden wir durch Anregungen unserer Kunden inspiriert.*

*Dank des neuen Materials, das wir jetzt in Kompressionsprodukten der Avicenum- Reihe verarbeiten, erhielten unsere Produkte gleich mehrere Verbesserungen. Der Strumpf lässt sich jetzt deutlich leichter über Spann und Ferse anziehen, die Strümpfe sind dadurch bequemer, -ohne merkliches Druckempfinden und sie schneiden nicht ein. Auch deren Haltbarkeit wurde durch die Materialverstärkung im Bereich der Ferse verlängert.*

*Ende des Jahres 2016 wurde unsere Firma Mitglied der Gütezeichengemeinschaft RAL, die alle wichtigen europäischen Produzenten von Kompressionswaren vereint. Unsere Firma hat sich dadurch verpflichtet bei der Herstellung von Strümpfen und Überziehern die Norm RAL-GZ 387/1 einzuhalten, die als Garant für sichere und funktionierende Kompression gilt. Die Avicenum-Produkte sollen Ihnen ja das Leben erleichtern.*

*Bitte beachten Sie auch unsere Sport-Produktreihe ROYAL BAY und die Mode-Produktreihe Avicenum FASHION mit seinen medizinischen Extras die im Laufe des Jahres 2017 vorgestellt wird.*

*Scheuen Sie sich nicht bei Fragen und Unklarheiten zu unseren Produkten sich an Ihre Aries Vertretung zu wenden, dort wird man sich gerne Ihrer Fragen annehmen und all Ihre Fragen beantworten.*

*Wir freuen uns auf die weitere Vertiefung unserer Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, dass die Anwendung unserer Produkte auch weiterhin zu Ihrer Entspannung beiträgt und Sie mit deren Hilfe Ihr Leben ein Stückchen mehr genießen können.*



... für ein leichteres Leben!

# Inhalt

Inhalt .....	3
Piktogramme, Zehenspitzen und Sitznähte .....	4
Etiketten richtig verstehen .....	5
Zertifizierung und Materialien (RAL, ISO, LYCRA®, Mikrofaser, Baumwolle) ...	6
Materialien (umspunnen Lycra, Sanitized® Silver) .....	7 - 8
Spitzen-, Noppenhaftbänder .....	9
Krampfadern und Prävention .....	10
<b>Avicenum 70</b> .....	<b>12 - 13</b>
<b>Avicenum 140</b> .....	<b>14 - 15</b>
<b>Avicenum 310</b> .....	<b>16</b>
<b>Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM</b> .....	<b>17</b>
<b>Avicenum 360</b> Spezialgrößen .....	<b>18 - 20</b>
<b>Avicenum 360 FINE</b> .....	<b>21</b>
<b>Avicenum 360 COTTON, Avicenum 360 ARM SLEEVE</b> .....	<b>22 - 23</b>
<b>Avicenum 520</b> .....	<b>24</b>
<b>Avicenum DiaFit</b> .....	<b>25</b>
<b>Avicenum DiaFit THERMO</b> .....	<b>26</b>
<b>Abmessen und Bestimmen der Größen</b>	
<b>Größentabellen</b>	

... für ein leichteres Leben!

# Piktogramme

## Armstrumpf-Ausführungen




mit Noppen-  
haftband, ohne  
Handteil

mit Noppen-  
haftband, mit  
Handteil

mit Schultergurt,  
mit Handteil

## Strumpfwaren-Ausführungen

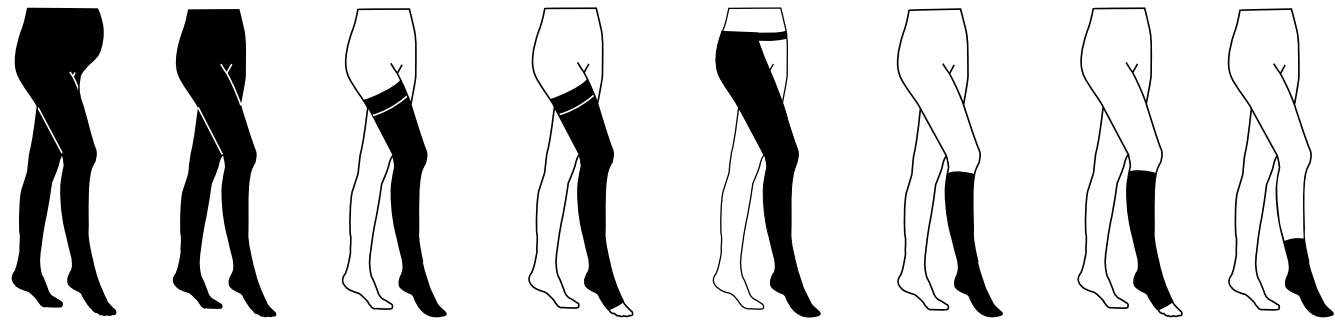

Kompressions-  
Umstands-  
strumpfhose

Kompressions-  
-Strumpfhose

Kompressions-  
Schenkelstrümpfe,  
Zehen geschlossen

Kompressions-  
Schenkelstrümpfe,  
Zehen offen

Kompressions-  
Schenkelstrumpf  
mit  
Hüftbefestigung

Kompressions-  
Wadenstrümpfe,  
Zehen geschlossen

Kompressions-  
Wadenstrümpfe,  
Zehen offen

Socken

## Zehenspitzen und Sitznähte



Zehenbereich  
verstärkt

Zehenbereich und  
Ferse verstärkt

„Safe-Compression-  
Zone“

Zehensicht-  
fenster

Spitzenhaft-  
band

Noppenhaft-  
band

Tailnenbefesti-  
gung




verstärkter  
Hosenteil mit  
kleiner Zwickel  
(G1)



verstärkter  
Hosenteil mit  
großer Zwickel  
(G2)



verstärkter  
Hosenteil mit  
Komfortzwickel  
(G3)

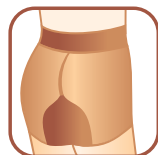

Avicenum 360  
Zwickel



für  
Schwangere




Schultergurt

# Etiketten richtig verstehen



Behandlung Sanitized Silver

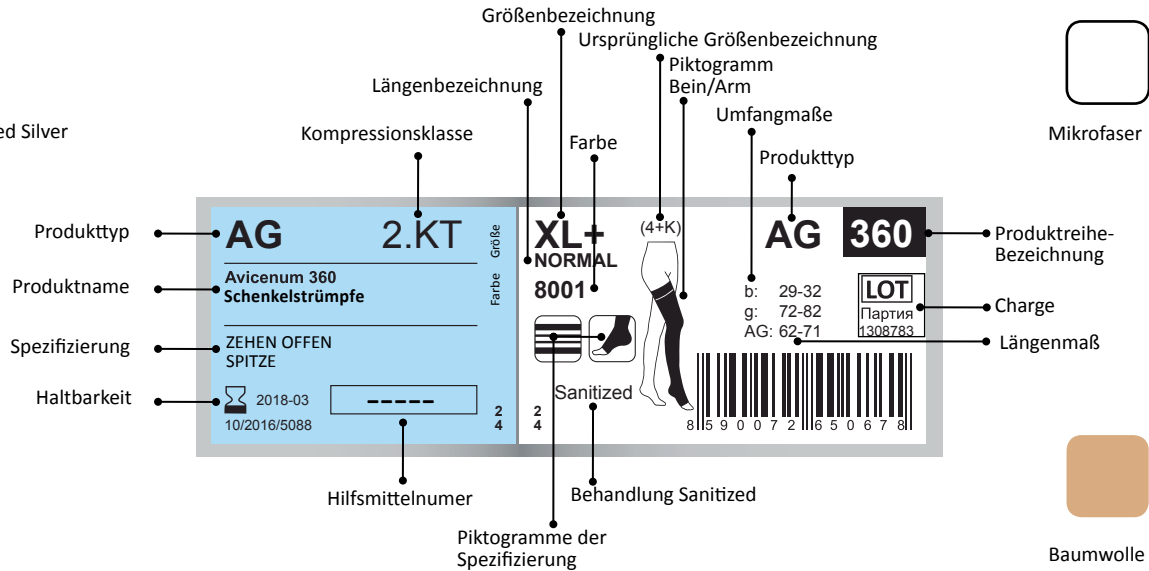

## Kompressionswirkung der Avicenum-Reihe

Avicenum	Kompressionsklasse	Kompression im Messpunkt b, Bereich der Ferse mmHg	Stadium	Indikation	Produkte
Stützstrümpfe	Stützfunktion Sehr leicht	< 18	C0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesundheitszustand ohne Anzeichen</li> <li>Vorbeugung von Krampfadern und Schwangerschaftsödemen</li> <li>Vorbeugung reisebedingter Ödeme</li> <li>Vorbeugung von Thrombosen und Embolien</li> </ul>	Avicenum 70
Medizinische Kompressionsstrümpfe	I Leicht	18 - 21	C0 - C1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krähenfüße</li> <li>müde und schwere Beine</li> <li>Ödem gelegentlich oder abends</li> <li>Beinschmerzen nach langem Stehen oder Sitzen (Risikoberufe)</li> <li>Vorbeugung von Schwangerschaftskrampfadern</li> <li>Vorbeugung der Reisetrombose</li> <li>Vorbeugung von Thrombosen und Embolien bei bettlägerigen Patienten</li> </ul>	Avicenum 140 Avicenum 310
	II Mittelstark	23 - 32	C2 - C4	<ul style="list-style-type: none"> <li>chronische Venenerkrankung</li> <li>ausgeprägte Schwangerschaftsvarikosis</li> <li>nach Krampfadernoperation</li> <li>nach Phlebothrombose</li> <li>verheiltes Ulcera cruris</li> <li>ausgeprägte Varikosis mit Ödemneigung</li> </ul>	Avicenum 360
	III Stark	34 - 46	C5	<ul style="list-style-type: none"> <li>fortgeschrittene chronische Venenerkrankung</li> <li>ausgeprägte Ödeme</li> <li>Hautveränderungen</li> <li>Lymphödeme</li> <li>fortgeschrittene Phlebitis</li> <li>rezidivierende Ulzera</li> <li>sekundäre Varikosis</li> </ul>	Avicenum 520

... für ein leichteres Leben!

# Zertifikate und Materialien

## RAL



Ende des Jahres 2016 wurde die Firma ARIES, a.s. schließlich Mitglied in der RAL-Gemeinschaft, unter deren Dach sich die namhaftesten europäischen Kompressions-Produkte- Hersteller befinden. Die Mitgliedschaft wird nur dem Produzenten ermöglicht, der nachweislich die **RAL-GZ 387/1**-Norm einhält. Diese Norm stellt die strengsten Ansprüche bezüglich einer abgestuften Kompression in allen Produktgrößen. Die ARIES-Kompressionsprodukte haben die Kontrollen in den Laboren des deutschen Prüfinstituts Hohenstein bestanden und der Hersteller Aries hat sich zu weiteren jährlichen Test-Messungen verpflichtet. Das Gütezeichen RAL, das ab 2017 auf den Verpackungen zu finden ist, gilt somit als Garantie für sichere und wirkungsvolle Kompression. Nur mit geprüfter Kompression kann man optimale therapeutische Ergebnisse bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphatischen- Systems erzielen.

## Zertifizierung ISO



Avicenum ist eine Kompressionsprodukt-Marke mit Extras, die das Leben erleichtern sollen und bei gesundheitlichen Beschwerden helfen. Für uns ist es besonders wichtig, dass Sie sich in unseren Produkten wohl und sicher fühlen. Deshalb legen wir größten Wert auf die Auswahl renommierter Materiallieferanten. Wir suchen nicht nur die hochwertigsten Materialien und Applikationen aus, die Produkte werden auch stichprobenmäßig auf Herz und Nieren getestet und nach strengen Test- Kriterien ausländischer Kliniken und Zertifizierungsinstituten auf Ihre Qualität geprüft.

Seit 2016 gibt es das Qualitätskontrollsystem bei ARIES a.s., das vom **Bureau Veritas** nach **ISO 9001:2015** zertifiziert wurde.

## Materialien



**Auf Qualität achten wir vom Anfang an. Wir entwerfen hochwertige Produkte, suchen die besten Materialien, die sorgfältig bearbeitet werden, und wir sind bemüht immer etwas extra dazugeben.**

**PAD Nylon (polyamid)** ist ein Grundstein der Strumpfproduktion. In den Avicenum-Produkten verarbeiten wir deshalb nur Markengarn PAD 6.6 von namhaften Produzenten aus der Schweiz, Italien und Frankreich.

**LYCRA** wurde zum Synonym für Elasthan. In den Avicenum-Produkten erzielen wir dank Lycra die gewünschte Kompression. Das Marken-Elasthan LYCRA ist somit ein Garant für Qualität, Funktionalität und Haltbarkeit des Produktes.

**Zertifikate** von unabhängigen Institutionen ergänzen unseren strengen internen Qualitätskontrollsystem.

... für ein leichteres Leben!

# Materialien

LYCRA®



LYCRA® Energize ist die Marktbezeichnung für das hochwertige Elasthan der Firmengruppe Invista. Es handelt sich um eine Faser, die die optimale Flexibilität des Materials bis an ihre Haltbarkeitsgrenzen gewährleistet und für die Kompressionswirkung der Produkte verantwortlich ist.

LYCRA® Soft Comfort ist eine sehr elastischer feiner Faser. Durch seine Verarbeitung haben wir eine bessere Dehnbarkeit unserer Produkte erzielt und dabei die Kompressionseigenschaften beibehalten. Die Strümpfe lassen sich jetzt leichter anziehen und bequemer tragen. LYCRA Soft Comfort passt sich dem Bein besser an. Besonders an den stark beanspruchten Stellen, wo sich oft Falten gebildet haben und das Bein eingeeengt wurde. Der Druck fühlt sich dank dieses

Materials schwächer an, obwohl der Strumpf immer noch die strengen Auflagen der abgestuften Kompression erfüllt. Mit diesem neuen Material konnten wir gleich mehrere unserer Avicenum-Produkte verbessern. Die Vorteile werden vor allem die Kunden spüren, die die Kompressionsklassen II und III benutzen, also Avicenum 360 und Avicenum 520. Das neue Material ermöglicht die Lockerung der Strickware, so das das Anziehen vor allem über den Spann und die Ferse jetzt leichter fällt. Auch bei Schwellungen im Knöchelbereich wirkt sich diese Lockerung aus.

Lockerung im Spannbereich bedeutet deutlich mehr Komfort ohne Drücken oder Einschneiden.

Wir haben auch den Saum beim offenen Zehenbereich verbessert, der Saum rollt sich dadurch nicht mehr zusammen und verrutscht nicht.

## Mikrofaser



Die Mikrofaser ist ein aus unzähligen Filamenten (Kapillaren) gesponnenes Garn. Ein solches zehn Kilometer langes Filament wiegt nicht einmal ein ganzes Gramm. Aus Mikrofaser hergestellte Produkte fühlen sich sehr fein an, sind komfortabel zu tragen, haben eine ausgezeichnete Saugkraft und sorgen damit auch für die nötige Schweißabfuhr. Sie erzeugen ein samtiges Gefühl auf der Haut und zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus.

Aus all diesen Gründen verwenden wir die Mikrofaser zur Herstellung all unserer Strumpfhosen in der Kompressionsklasse II, auch dort wo man dies in Bezug auf den Komfort als einen weit über die Norm hinausgehenden Luxus empfindet.

## Langfaserige gekämmte Baumwolle




Für die Herstellung von Avicenum-Produkten mit Baumwollanteil verwenden wir ausschließlich gekämmte Baumwolle. Das so verarbeitete Garn kann im Vergleich zur gewöhnlichen Baumwolle bis zu dreimal so lang sein. Diese Vorgehensweise beim Herstellungsprozess stellt ausreichendes Überdecken der Fasern bei den Spinn- oder Webprozessen sicher.

Dank der Verwendung dieses hochwertigen Materials wird das Produkt an den am meisten beanspruchten Stellen noch widerstandsfähiger und erweist Ihnen dadurch noch länger gute Dienste.

... für ein leichteres Leben!

## Umspinnene LYCRA® für empfindliche Haut und längere Produkthaltbarkeit

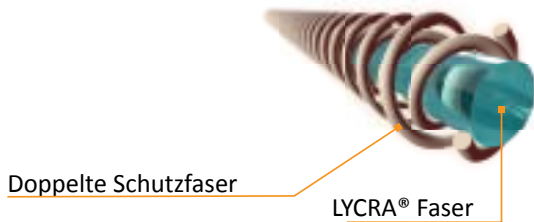

Eine blanke Elasthan-Faser kann bei empfindlicher Haut unangenehme Reizungen hervorrufen. Deshalb wird die LYCRA®-Faser mit einer doppelten Schutzfaserschicht umspinnen. Dies erhöht den Tragekomfort und führt zu längerer Haltbarkeit des Produkts. Wir machen keine Kompromisse und verarbeiten diese Luxusfaser in allen unseren Avicenum-Produkten.

## Sanitized® Silver

### Sanitized® Silver - die antimikrobiellen Silberionen aus der Schweiz



Sanitized® Silver (aktiver Biozid-Anteil: Silbernitrat) ist eine hochwertige **antimikrobielle Applikation** der renommierten schweizerischen Gesellschaft Sanitized AG. Das Silber zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Beständigkeit, die vollkommen gesundheitliche Unschädlichkeit und hohe Wirksamkeit aus. Es funktioniert auf der **Basis von Silberionen** und enthält keinerlei potenziell problematisches Nanosilber.


Die Applikation Sanitized® Silver befindet sich bei unseren Avicenum-Produkten direkt auf der Oberfläche der Textilfaser - also dort, wo vermehrt Bakterien, Mykosen und Hautpilze auftreten können. Das verwendete Silber wirkt sehr verlässlich gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen. Die Silberionen dringen durch die Zellmembran in das Zellinnere ein und verhindern dort die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen. Dadurch wird eine weitere Vermehrung sowie Bildung von Zellkolonien verhindert, die oft auch gegen Waschmittel resistent sind.

Das Silber wirkt daher auch **deodorisierend**, lässt unangenehme Körpergerüche gar nicht entstehen und macht das alltägliche Tragen der Produkte zu einem Erlebnis. Gleichzeitig schützt es die Textilfaser vor Beschädigung und erhöht die Haltbarkeit des Produktes.

Die patentierte Bearbeitung Sanitized® Silver wurde erfolgreich dermatologisch getestet, ist höchst beständig und völlig gefahrlos für den menschlichen Organismus sowie für die Umwelt. Sie hat auch die Zertifizierung OEKO-TEX. Die Gesellschaft Aries **garantiert Ihnen**, dass an den Avicenum-Produkten kein Nanosilber verwendet wird. Zudem ist die Bearbeitung nicht abwaschbar.



Wirkung des Silbers auf Bakterien

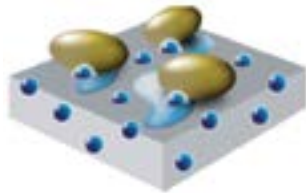

Im einer feuchten Umgebung werden die Bakterien durch die Silberionen lokalisiert und deaktiviert.



Unbearbeitete Faser



Mit Sanitized Silver bearbeitete Faser

... für ein leichteres Leben!



# Spitzen- und Noppenhaftbänder

## Spitzen- und Noppenhaftbänder

Die Säume an unseren Produkten sind keine bloßen Abschlüsse der Strümpfe, es geht vielmehr um die Funktionsfähigkeit, die zu Ihrem Tragekomfort beiträgt.

Unser **Spitzenhaftband** verbirgt transversal orientierte **Lamellen**, die das unangenehme Abrollen und Runterrutschen verhindern. Von innen ist der Spitzenhaftband mit drei Silikonstreifen versehen, die dem **Strumpf einen perfekten Halt verleihen**.


Ein **Noppenhaftband** ist eine optimale Wahl für Patienten mit sehr empfindlicher Haut. Das punktuell angebrachte Silikon lässt die Haut gut atmen und bleibt dabei immer in gleicher Position.



**Tipp:** Waschen Sie die Strümpfe nicht mit Weichspüler. Das Silikon verliert dadurch seine Haftfähigkeit. An eingecremten Beinen haftet das Silikon ebenso wenig. Das Abwischen mit einem Reinigungsmittel auf Alkoholbasis kann jedoch die Haftfähigkeit von Silikon wieder herstellen.

## Medizinische Säume bei Socken und Kniestrümpfen

Medizinische Säume bei Socken und Kniestrümpfen sind weich, bewirken keinerlei Druckstellen und hemmen die Blutzirkulation in den Beinen nicht. Sie sind das Ergebnis langjähriger Entwicklung, zielorientierter Tests und Proben, die das unabhängige akkreditierte Labor ITC Zlín durchführt.

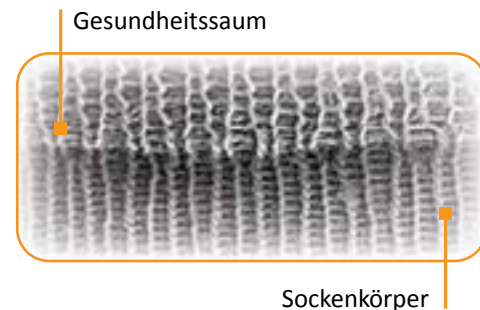

... für ein leichteres Leben!

# Krampfadern und ihre Prävention

## Krampfadern und Kompressionstherapie


**Krampfadern sind ein gesundheitliches Phänomen das in den hochentwickelten Ländern 40 % der weiblichen und 20 % der männlichen Bevölkerung betrifft.** Eine Erkrankung des Venensystems zeichnet sich über eine lange Zeitspanne ab und verlangt dann eine radikale Änderung des Lebensstils und eine permanente Behandlung. Die Basis der Behandlung bildet dabei die Kompressionstherapie.

Krampfadern (Varizen) entstehen auf Grund genetischer Veranlagung oder infolge vieler anderer Faktoren, wie stehende oder sitzende Tätigkeiten, Bewegungsmangel, Alter, Übergewicht oder auch Schwangerschaften. Abgesehen von diesen Ursachen ist bei Beschädigung von Venenklappen oft auch eine Entzündung vorangegangen.

Infolge der Funktionsstörung des Venensystems machen sich dann Symptome der chronischen Veneninsuffizienz, wie Krampfadern, Schwellungen der unteren Gliedmaßen und eine durch Hämosiderin verursachte Pigmentierung, aber auch Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür) - die schwerste Form der Veneninsuffizienz, bemerkbar.

### Kompressionsstrumpfware

Das Schutzprinzip von Kompressionsstrümpfen besteht darin, dass im Bereich des Fußknöchels ein definierter Druck erzeugt wird der dann in Richtung der Taille stufenweise abgeschwächt wird. Zahlreiche Studien beweisen, dass durch diese Stützung der Venenwände im unteren Bereich des Beines die Blutzirkulation wirksam und wesentlich beeinflusst werden kann. Dies fördert auch den Rückfluss des Blutes zurück zum Herzen. Durch Kompressionsstrümpfe werden schmerzende Beine verhindert und ein besseres und fitteres Gefühl vermittelt.

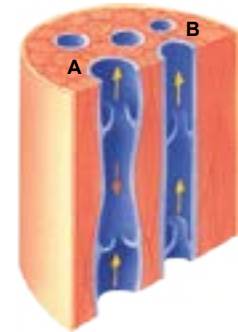

A – betroffene Vene  
B – gesunde Vene

## Sieben Tipps zur Vorbeugung von Krampfadern

**Wie bei vielen anderen Erkrankungen spielt auch bei der Prävention von Varizen der Lebensstil eine entscheidende Rolle.**

**Wir bieten Ihnen deshalb ein paar einfache Tipps an um Ihre Gesundheit zu verbessern .**

- 1 Bewegung:** Machen Sie Spaziergänge, laufen Sie, fahren Sie Rad oder gehen Sie schwimmen. Die Bewegung unterstützt die Tätigkeit der „Muskelpumpe“ in Ihren unteren Gliedmaßen und fördert somit auch die Blutzirkulation.
- 2 Ernährung:** Eine genügende Zufuhr von Vitamin C und E, von Ballaststoffen, Kalzium, Magnesium und Zink sind auch von großer Bedeutung.
- 3 Beine auf den Tisch:** Sie finden tagsüber bestimmt ein paar Mal Zeit, eine Position mit hochgelegten Beinen einzunehmen. Die Blutzirkulation in den unteren Gliedmaßen wird damit positiv gefördert.
- 4 Blutzirkulation:** Vermeiden Sie langes Stehen oder Sitzen, eine Sitzposition mit gekreuzten Beinen und das Tragen eng anliegender Hosen oder zu hoher Absätze.
- 5 Kaltes Duschen:** Gönnen Sie Ihren Beinen zwischendurch mal eine kalte Dusche oder kühlende Umschläge.
- 6 Bein- und Fußgymnastik:** Drehen Sie ihre Füße im Sprunggelenk abwechselnd nach außen und nach innen. Strecken und krallen Sie die Zehen und spannen Sie den Mittelfuß an. Beugen Sie die Beine im Knie und ziehen Sie sie zur Brust. Strecken Sie die Beine aus, oder machen Sie im Liegen Bewegungen wie beim Radfahren. Manche dieser Übungen lassen sich auch gut in den Pausen im Büro oder im Aufenthaltsraum machen.
- 7 Stützstrumpfwaren:** Tragen Sie Stütz-Strumpfhosen oder -Kniestrümpfe. Hochwertige Stützstrumpfwaren sind heutzutage nicht mehr auf den ersten Blick von gewöhnlichen Strümpfen zu unterscheiden. Auch die Auswahl ist mittlerweile sehr groß. Zuerst müssen Sie jedoch bei der Auswahl des für Sie geeigneten Produkts darauf achten, daß Säume und der Strumpf selbst keine Einengungen verursachen oder gar die Blutzirkulation hemmen.



# *Avicenum*


Medizinische Kompression mit Extras

... für ein leichteres Leben!

*... für ein leichteres Leben!*

### Avicenum 70 - Prävention von Krampfadern und Beinschwellungen

Die Stützstrumpfware Avicenum 70 wirkt positiv auf den Kreislauf, beugt wirksam die Bildung von Krampfadern und gelegentliche Schwellungen vor und lindert das Gefühl schmerzender und müder Beine. Beim täglichen Tragen lernt man auch die antimikrobielle Sanitized Silver Beschichtung, ein Schweizer Patent, zu schätzen.

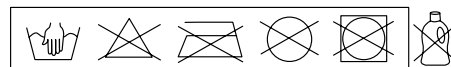

Zusammensetzung: 76 % PAD Nylon, 24 % LYCRA®

#### Stütz-Wadenstrümpfe TRAVEL



Handelsbezeichnung: **Avicenum TRAVEL 70 Stütz-Wadenstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **36 - 38      39 - 41      42 - 44      45 - 47**

Farben: 0000, 7007, 8001, 9999

0000 only in sizes 39 - 41

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 16 Packungen im Karton

#### Stütz-Wadenstrümpfe



Handelsbezeichnung: **Avicenum 70 Stütz-Wadenstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **36 - 38      39 - 41      42 - 44**

Farben: 0000, 7007, 8001, 8003, 9999

0000 nur bei den Größen 36-38 und 39-41 erhältlich

Verpackung: 1 Paar in der Packung 16 Packungen im Karton

... für ein leichteres Leben!

### Stütz-Schenkelstrümpfe mit SPITZENHAFTBAND



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 70 Stütz-Schenkelstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **M, L** Oberschenkelumfang 50 - 60 cm

Farben: 7007, 8001, 8003, 9999

**Größen:** **XL** Oberschenkelumfang über 60 cm

Farben: 8001, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Stütz-Strumpfhose



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 70 Stütz-Strumpfhose**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Kleiner Zwickel** **Großer Zwickel**

**S**

**S+**

**M**

**M+**

**L**

**L+**

**XL**

**XL+**

Farben: 3090, 5090, 7007, 8001, 8003, 9999

Verpackung: 1 Stck. in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Umstands-Stützstrumpfhose

#### MATERNITY



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 70 Umstands-Stützstrumpfhose**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **M, L, XL**


Farben: 8001, 9999

Verpackung: 1 Stck. in der Packung, 8 Packungen im Karton

Während der Schwangerschaft ist die Frau dem größten Risiko einer Venenerkrankung ausgesetzt. Ab dem 4. Monat empfehlen wir die Umstands-Stützstrumpfhose Avicenum 70 zu tragen, die eine spezielle Verarbeitung im Bauchbereich hat.

## Avicenum 140 - unterstützende Heiltherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Medizinische Strumpfware der Kompressionsklasse I verringert die anfänglichen Beschwerden der Veneninsuffizienz, lindert das Gefühl schmerzender und müder Beine. Beim täglichen Tragen werden Sie auch die Behandlung mit Sanitized® Silver schätzen. Die Haltbarkeit dieses Produktes wird durch den verstärkten Fersenbereich wesentlich verlängert.

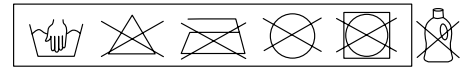

Zusammensetzung: 69 % PAD Nylon, 31 % LYCRA®

### Kompressions-Wadenstrümpfe FEIN



Handelsbezeichnung: **Avicenum 140 Kompressions-Wadenstrümpfe FEIN**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Normal** **Long**  
**S normal** **S long**  
**M normal** **M long**  
**L normal** **L long**

Farben: 8001, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 16 Packungen im Karton

### Kompressions-Wadenstrümpfe STRONG



Handelsbezeichnung: **Avicenum 140 Kompressions-Wadenstrümpfe BLICKDICHT**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Normal** **Long**  
**S normal** **S long**  
**M normal** **M long**  
**L normal** **L long**

Farben: 8001, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 16 Packungen im Karton

... für ein leichteres Leben!

### Kompressions-Schenkelstützstrümpfe **FEIN** mit **SPITZENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung: **Avicenum 140 Kompressions-Schenkelstrümpfe FEIN**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Normal** **Long**  
**S normal** **S long**  
**M normal** **M long**  
**L normal** **L long**

Farben: 7007, 8001, 8080, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Kompressions-Schenkelstrümpfe **BLICKDICHT** mit **NOPPENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung: **Avicenum 140 Kompressions-Schenkelstrümpfe BLICKDICHT**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Normal** **Long**  
**S normal** **S long**  
**M normal** **M long**  
**L normal** **L long**

Farben: 8001

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Kompressions-Strumpfhose



Handelsbezeichnung: **Avicenum 140 Kompressions-Strumpfhose**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Kleiner Zwickel** **Größer Zwickel** **Komfortzwickel**  
**S normal** **M normal** **L normal**  
**S long** **M long** **L long**


Farben: 7007, 8001, 8080, 9999

Verpackung: 1 Stck. in der Packung, 8 Packungen im Karton

## Avicenum 310 - Heilende Kompressionstherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Die medizinischen Kompressionsstrümpfe der Kompressionsklasse I mit 60% Baumwollanteil sind ein wichtiger Teil der Therapie und sorgen für eine Unterstützung der Venenwände, sie fördern dadurch wirksam die Kreislauffunktion und verhindern schmerzhaftes Beinschwellungen der unteren Gliedmaßen.

Sie sind bestens zum ganztägigen Tragen, bei allen stehenden und sitzenden Tätigkeiten geeignet. Eignen sich aber auch zum Tragen beim Sport und Reisen.

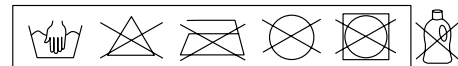

Zusammensetzung: 60 % Baumwolle, 28 % PAD Nylon, 12 % LYCRA®

### Unisex medizinische Baumwoll-Kniestrümpfe



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 310 Kniestrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **36 - 38**    **39 - 41**    **42 - 44**    **45 - 47**

Farben: 0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Unisex medizinische Baumwoll-Kniestrümpfe TRAVEL



Handelsbezeichnung:

**Avicenum TRAVEL 310 Kniestrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **36 - 38**    **39 - 41**    **42 - 44**    **45 - 47**

Farben: 0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999


Verpackung: 1 Paar im Blister mit Aufhängung

... für ein leichteres Leben!



## Prophylaxe-Waden-/Schenkelstrümpfe

Waden- und Schenkelstrümpfe Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM sind für bettlägerige Patienten bestens geeignet und verhindern beim Tragen das Entstehungsrisiko von Thrombosen vor, während und nach der OP.

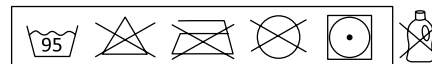

Zusammensetzung: 70 % PAD Nylon, 30 % LYCRA®

### Medizinische Wadenstrümpfe

Handelsbezeichnung: **Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM Kompressions-Wadenstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: S M L XL XXL

Farben: 0000

Ausführung: mit Zehensichtfenster

Verpackung: 1 Paar in der Packung

### Medizinische Schenkelstrümpfe mit Noppenhaftband

Handelsbezeichnung: **Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM Kompressions-Schenkelstrümpfe**


Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: S M L XL XXL

Farben: 0000

Ausführung: mit Zehensichtfenster

Verpackung: 1 Paar in der Packung

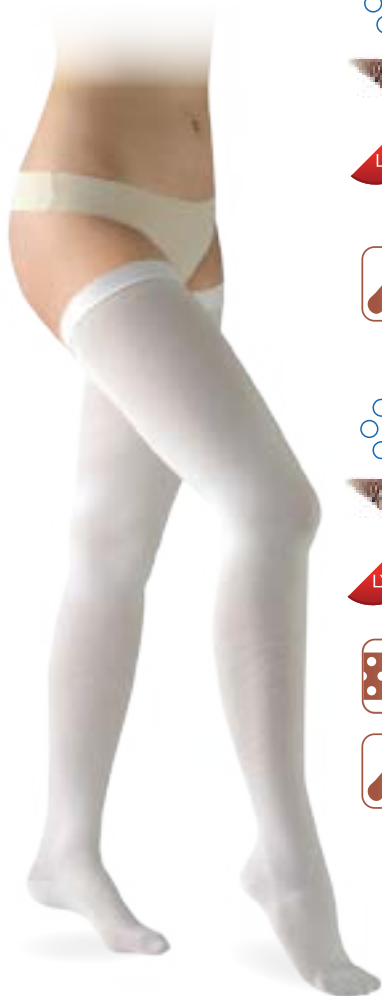


Zehensichtfenster

... für ein leichteres Leben!

### Avicenum 360 - heilende Kompressionstherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Medizinische Strümpfe der Kompressionsklasse II unterstützen die ordnungsgemäße Funktion der Venenklappen, stabilisieren den Blutkreislauf und sind ein unverzichtbarer Teil der Druck-Therapie. Avicenum 360 werden aus feiner und angenehmer Mikrofaser hergestellt.

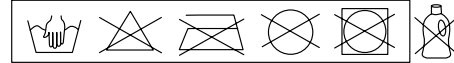

Zusammensetzung: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®

### Medizinische Wadenstrümpfe



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 360 Kompressions-Wadenstrümpfe**



Bearbeitung:	Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung				
Größen:	<b>S normal</b>	<b>M normal</b>	<b>L normal</b>	<b>XL normal</b>	<b>XXL normal</b>
	<b>S long</b>	<b>M long</b>	<b>L long</b>	<b>XL long</b>	<b>XXL long</b>
Farben:	8001, 9999				
Ausführung:	Zehen offen		Zehen geschlossen		
Verpackung:	1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton				

### Schlankgrößen

Haben Sie schlanke Beine und verrutschen die Strümpfe?

Manche Patienten mit Kreislaufstörungen haben eine atypische Form der unteren Gliedmaßen. Bei Männern ist der Umfang der Oberschenkel meist dünner als bei Frauen. Im höheren Alter kann es zusätzlich zum Rückgang von Muskelmasse kommen. Bei einer grundlegenden Disproportion wird eine Maßanfertigung erforderlich (Das Bestellformular finden Sie auf: [vertrieb@aries.eu](http://vertrieb@aries.eu)).

Bei leichter Disproportion bieten wir als Lösung den Minus-Strumpf mit verkleinertem Oberschenkelumfang an. Diese neue Größen-Reihe entstand nach enger Zusammenarbeit mit unseren Fachärzten und ist mit „Minus“ gekennzeichnet.

Ausführung: Noppenhaftband, Zehen offen.



### Kurzgrößen (SHORT)

Ist die Kurzgröße immer noch zu lang?

Es kann passieren, dass trotz sorgfältiger Messung zu Hause, beim Arzt oder im Sanitätshaus die Strümpfe nicht sitzen oder zu lang ausfallen, obwohl die Tabellenmaße stimmen.

Für solche Fälle entstand die neue Produktreihe mit „SHORT-“ (Kurz-) Größen. Hier haben wir die Strumpflänge nochmal deutlich gekürzt. Wir reagieren damit auf die große Nachfrage des Marktes.

Ausführung: Spitzenhaftband, Zehen offen.



... für ein leichteres Leben!

### Medizinische Schenkelstrümpfe mit SPITZENHAFTBAND



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 Kompressions-Schenkelstrümpfe**



Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: S normal M normal L normal XL normal XXL normal  
 S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal  
 S long M long L long XL long XXL long  
 S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farben: 8001, 8080, 9999, 8080  
 8080 **nicht bei „+“ und XXL**

Ausführung: Zehen offen / Zehen geschlossen

#### SPEZIALGRÖSSE

**KURZE GRÖSSE** S short M short L short XL short

Farben: 8001

Ausführung: Zehen offen

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton

### Medizinische Schenkelstrümpfe mit NOPPENHAFTBAND



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 Kompressions-Schenkelstrümpfe**



Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: S normal M normal L normal XL normal XXL normal  
 S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal  
 S long M long L long XL long XXL long  
 S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farben: 8001, 9999 **XXL normal und long nur in 8001**

Ausführung: Zehen offen / Zehen geschlossen

#### SPEZIALGRÖSSE

**ENGERE SCHENKEL-UMFANG** S- normal M- normal L- normal XL- normal  
 S- long M- long L- long XL- long

Farben: 8001

Ausführung: Zehen offen

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton

### Medizinischer Schenkelstrumpf mit **HÜFTBEFESTIGUNG**



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 Kompressions-Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **S normal** **S long**  
**M normal** **M long**  
**L normal** **L long**  
**XL normal** **XL long**

Farben: 8001

Ausführung: Zehen geschlossen  
 links / rechts

Verpackung: 1 Stck. in der Packung, 4 Packungen im Karton

### Medizinische Strumpfhose



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 Kompressions-Strumpfhose**



Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

**Größen:** **Avicenum 360 kleiner Zwickel** **Avicenum 360 großer Zwickel**  
**S normal** **L normal**  
**M normal** **XL normal**  
**S long** **L long**  
**M long** **XL long**

Farben: 8001, 9999


Ausführung: Zehen geschlossen

Verpackung: 1 Stck. in der Packung, 4 Packungen im Karton

... für ein leichteres Leben!

## Avicenum 360 FINE - heilende Kompressionstherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Luftige medizinische Strümpfe FINE mit feiner Struktur und der vollständiger Funktion der Kompressionsklasse 2. Diese Neuheit wurde für ein angenehmes Tragegefühl entwickelt. Avicenum 360 FINE ermöglicht es Ihnen, trotz Kompressions-Behandlung ein aktives Leben ohne Einschränkungen zu führen. Ein weiterer Aspekt ist auch deren modisches Aussehen.

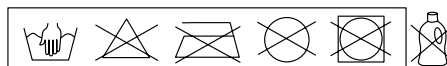

Zusammensetzung: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®

## Medizinische Schenkelstrümpfe mit **SPITZENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung:

**Avicenum 360 FINE Kompressions-Schenkelstrümpfe**

Bearbeitung:	Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung			
Größen:	<b>S normal</b>	<b>M normal</b>	<b>L normal</b>	<b>XL normal</b>
	<b>S long</b>	<b>M long</b>	<b>L long</b>	<b>XL long</b>
Farben:	8001			
Ausführung:	Zehen offen / Zehen geschlossen			
Verpackung:	1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton			

## Medizinische Hilfsmittel

Seit Mitte des Jahres 2016 erfüllen Avicenum Produkte der Reihe Avicenum 360 nachweislich die Anforderungen der RAL-GZ 387/1-Norm die von der RAL Gemeinschaft gefordert werden. Dies ist Voraussetzung zur Mitgliedschaft in der Güte-Gemeinschaft europäischer Kompressionsstrumpfhersteller.

Die Kontrollen und Tests wurden vom renommierten Prüfinstitut Hohenstein durchgeführt.


Dies garantiert:

- sichere und wirkungsvolle Kompression.
- jährliche Überprüfungen durch das Prüfinstitut Hohenstein.
- klinische Bestätigung der Produktwirksamkeit und Sicherheit
- gültige Konformitätserklärung durch EU Norm 93/42/EEC
- Eintrag im Hilfsmittelverzeichnis und mit Hilfsmittelnummer

... für ein leichteres Leben!

### Avicenum 360 COTTON Kompressionstherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Medizinische Strumpfware der Kompressionsklasse II mit einem hohen Baumwollanteil (60 %) ist besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Trotz des Baumwollanteils sitzen die Strümpfe perfekt und lockern sich nicht. Die Baumwolle ist um angenehme Mikrofaser und zweifach umspinnene LYCRA® ergänzt. Die Strümpfe Avicenum 360 COTTON fördern die richtige Tätigkeit der Venenklappen, stabilisieren die Blutzirkulation und sind sehr gut für die Kompressionstherapie geeignet

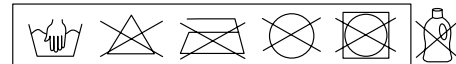

Zusammensetzung: 60 % Baumwolle, 35 % LYCRA, 5 % PAD Nylon

#### Medizinische Wadenstrümpfe



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 COTTON Kompressions-Wadenstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung  
 Größen: **S normal**    **M normal**    **L normal**    **XL normal**  
               **S long**        **M long**        **L long**        **XL long**  
 Farben: 8001  
 Ausführung: Zehen offen  
 Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

#### Medizinische Schenkelstrümpfe mit **SPITZENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung: **Avicenum 360 COTTON Kompressions-Schenkelstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung  
 Größen: **S normal**    **M normal**    **L normal**    **XL normal**  
               **S+ normal**    **M+ normal**    **L+ normal**    **XL+ normal**  
               **S long**        **M long**        **L long**        **XL long**  
               **S+ long**        **M+ long**        **L+ long**        **XL+ long**  
 Farben: 8001  
 Ausführung: Zehen offen  
 Verpackung: 1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton

... für ein leichteres Leben!


### Medizinische Schenkelstrümpfe mit **NOPPENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung:	<b>Avicenum 360 COTTON Kompressions-Schenkelstrümpfe</b>			
Bearbeitung:	Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung			
Größen:	<b>S normal</b>	<b>M normal</b>	<b>L normal</b>	<b>XL normal</b>
	<b>S long</b>	<b>M long</b>	<b>L long</b>	<b>XL long</b>
Farben:	8001			
Ausführung:	Zehen offen			
Verpackung:	1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton			

### Avicenum 360 ARM SLEEVE

Unser Kompressions-Armstrumpf eignet sich hervorragend zur Heiltherapie lymphatisch bedingter Armschwellungen. Die Schwellungen der Gliedmaßen, die durch Stauung der Lympheflüssigkeit im Gewebe verursacht werden, bedürfen dauerhafter und konsequenter Heiltherapie. Die Kompressionstherapie sollte die Schwellung beseitigen oder zumindest stabilisieren. Die verwendete Mikrofaser ist angenehm weich und die Oberfläche wurde durch die antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung aufgewertet.

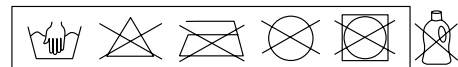

Zusammensetzung: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®


### Medizinischer Armstrumpf



Handelsbezeichnung:	<b>Avicenum 360 Kompressions-Armstrumpf</b>			
Bearbeitung:	Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung			
Größen:	<b>S normal</b>	<b>M normal</b>	<b>L normal</b>	<b>XL normal</b>
	<b>S long</b>	<b>M long</b>	<b>L long</b>	<b>XL long</b>
Farben:	8001			
Ausführung:	mit Handteil / ohne Handteil / mit Noppenhaftband mit Schultergurt			
Verpackung:	1 Stck. in der Packung, 8 Packungen im Karton			

## Avicenum 520 Kompressionstherapie von Krampfadern und Beinschwellungen

Die Kompressionsstrümpfe der Kompressionsklasse III sind zur Behandlung von chronischen Venen-Unterfunktionen und lymphatischen Ödemen konzipiert. Es handelt sich hierbei um einen sehr wichtigen Teil der Therapie. Besonders nach Lymphdrainagen helfen sie einen Rückfluss der Lymphflüssigkeit zu den Ödemen zu verhindern. Sie wirken der Neubildung von Krampfadern entgegen und sind zur Behandlung von chronischen Venenerkrankungen im fortgeschrittenem Stadium bestimmt. Die selbsthaftenden Schenkelstrümpfe sind für ganztägiges Tragen gedacht, daher sind sie aus feinsten Mikrogarnen, mit haltbaren Sanitized-Silver-Ionen und mit einem breiten Saum, der die Strümpfe zuverlässig fixiert, ausgestattet.

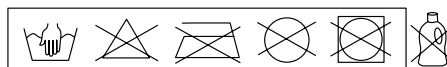

Zusammensetzung: 55 % PAD Nylon, 45 % LYCRA®

### Medizinische Wadenstrümpfe



Handelsbezeichnung: **Avicenum 520 Kompressions-Wadenstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **S normal    M normal    L normal    XL normal**  
**S long        M long        L long        XL long**

Farben: 8001

Ausführung: Zehen geschlossen

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 8 Packungen im Karton

### Medizinische Schenkelstrümpfe mit **NOPPENHAFTBAND**



Handelsbezeichnung: **Avicenum 520 Kompressions-Schenkelstrümpfe**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: **S normal        M normal        L normal        XL normal**  
**S+ normal      M+ normal      L+ normal      XL+ normal**  
**S long            M long            L long            XL long**  
**S+ long          M+ long          L+ long          XL+ long**

Farben: 8001

Ausführung: Zehen geschlossen

Verpackung: 1 Paar in der Packung, 4 Packungen im Karton


... für ein leichteres Leben!



## Avicenum DIAFIT Diabetikersocken

Die Avicenum DiaFit Socken mit 80% Anteil gekämmter langfaseriger Baumwolle sind eine Präventionsmöglichkeit um den sogenannten 'Diabetischen Fuß' zu verhindern. Der angenehme medizinische Saum verhindert Druckstellen, sitzt aber fest genug um das Verrutschen zu vermeiden. Die Spitze ist mit einer flachen gekettelten Naht versehen, damit keinerlei unerwünschte Druckstellen entstehen können. Die waschbeständige Sanitized-Silver-Bearbeitung aus der Schweiz bietet Schutz vor Mykosen und Hefepilzen und erhöht somit den Tragekomfort.

Gleichzeitig verhindert es die Entstehung unangenehmer Gerüche.

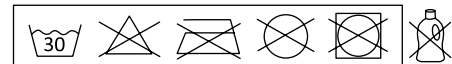

Zusammensetzung: 80 % Baumwolle, 18 % PAD Nylon, 2 % LYCRA®



### Baumwollsocken für Diabetiker

Handelsbezeichnung:

**Avicenum DiaFit Diabetikersocken**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: 36 - 39    39 - 42    41 - 44    44 - 47

Farben: 0000, 5090, 7001, 7007, 8000, 8080, 9999  
8080 nicht in der Größen 36-39 und 39-42

Verpackung: 1 Paar in der Blister-Packung mit Aufhängung


## TIPPS FÜR DIE DIABETIKER-FUSSPFLEGE

- 1 Tragen Sie gut passende Schuhe.
- 2 Kontrollieren Sie täglich ihre Füße.
- 3 Rauchen Sie nicht.
- 4 Hygiene beachten.
- 5 Entfernen Sie die Hornhaut vorsichtig.
- 6 Tragen Sie nur hochwertige Baumwollsocken.
- 7 Vermeiden Sie extreme Kälte oder Hitze.
- 8 Besuchen Sie regelmäßig die Pediküre.
- 9 Bei Beschwerden immer die Fachleute aufsuchen.
- 10 Verlangen Sie bei jedem Arztbesuch die Kontrolle Ihrer Füße.

# Avicenum DiaFit THERMO

## Avicenum DIAFIT THERMO Diabetikersocken

Die wärmenden Avicenum DiaFit THERMO Socken erweitern die Familie der beliebten Diabetikersocken. Sie zeichnen sich durch einen hohen Baumwollanteil (83 %) und hochwertige Verarbeitung aus. Der medizinischer Saum engt nicht ein und beugt somit der Beinschwellung vor. Die flache Naht an der Spitze ist sehr fein und verhindert Schürfstellen. Die wärmende Plüschsohle beschert ein wärmendes Wohlgefühl. Die Verstärkung im Spitzen- und Fersenbereich verbessert den Tragekomfort und erhöht die Produkthaltbarkeit. Der dünnere Spannbereich ermöglicht eine ungestörte Blutzirkulation und verhindert gleichzeitig das Verrutschen des Materials. Die antimikrobiellen Sanitized-Silver-Ionen wirken Fußpilzkrankungen entgegen.

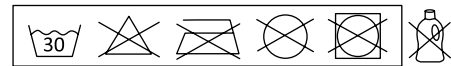

Zusammensetzung: 83 % Baumwolle, 15 % PAD Nylon, 2 % LYCRA®



### Wärmende Baumwollsocken für Diabetiker

Handelsbezeichnung:

**Avicenum DiaFit THERMO Diabetikersocken**

Bearbeitung: Antimikrobielle Sanitized® Silver-Bearbeitung

Größen: 36 - 39    39 - 42    41 - 44    44 - 47

Farben: 0000, 7007, 8001, 9999

Verpackung: 1 Paar in der Blister-Packung mit Aufhängung


... für ein leichteres Leben!

## Vorgehensweise beim Abmessen und Bestimmen der Größen unserer Avicenum-Produkte

Bei der Größenbestimmung sollten Sie die betreffenden Körperpartien sehr sorgfältig vermessen. Von der Messung hängt sehr viel ab – die richtige Funktion der Strümpfe/des Armstrumpfs aber auch der Erfolg Ihrer Heiltherapie. Nehmen Sie morgens Maß, denn im Laufe des Tages schwellen die Gliedmaßen an.


Messen Sie an allen erforderlichen Messpunkten laut Tabelle. Die Lokalisierung der Messpunkte zeigt die Grafik. Die in der Tabelle grau unterlegten Messpunkte sind dabei am wichtigsten.

### Messpunkte - Hand

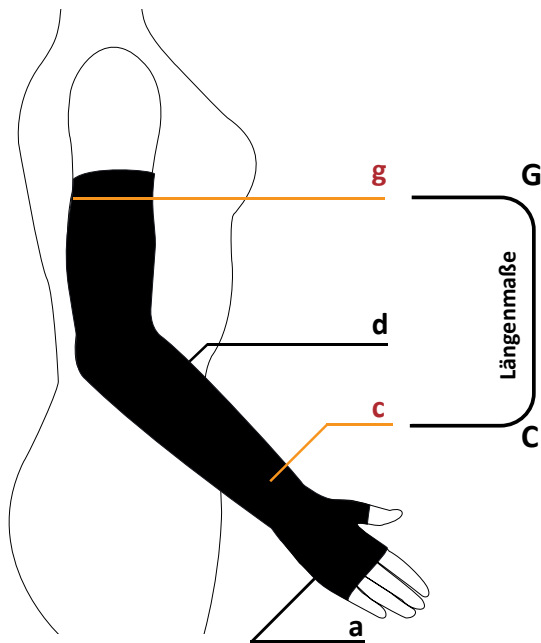

- a Handflächenumfang
- c Handgelenksumfang
- d Unterarmumfang
- g Umfang unter der Achsel
- C – G Längenmaße

### Messpunkte - Bein

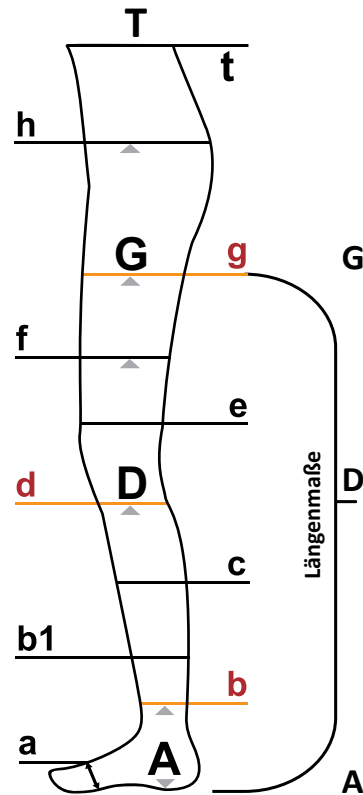

- a Fußumfang
- b Umfang über dem Knöchel
- b1 Umfang 10 cm über dem Knöchel
- c Wadenumfang
- d Umfang unter dem Knie
- e Umfang über dem Knie
- f Umfang Oberschenkelmitte
- g Umfang Oberschenkel (5 cm unter dem Schritt)
- h Hüftumfang
- t Taillenumfang

#### Längenmaße

- A – D Wadenstrumpf
- A – G Schenkelstrumpf

## Avicenum 140 (CCL1)

Größe	Beinumfang an den zu messenden Punkten						LÄNGENMAßE			
	b	d	f	g	h	t			normal	long
<b>S</b>	20 – 24	34 – 37	46 – 50	50 – 55	110	80	Wadenstrümpfe A – D	A – D	do 38	nad 38
<b>M</b>	24 – 27	37 – 40	50 – 54	55 – 60	120	90			Schenkelstrümpfe A – G Strumpfhose	A – G
<b>L</b>	27 – 30	40 – 44	54 – 58	60 – 66	130	100				

## Avicenum 360/Avicenum 520 (CCL2/CCL3)

Größe	Beinumfang an den zu messenden Punkten									
	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
<b>S-</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
<b>S*</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
<b>S+*</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
<b>M-</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
<b>M*</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>M+*</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
<b>L-</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>L*</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>L+*</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
<b>XL-</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>XL*</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
<b>XL+*</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
<b>XXL</b>	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

### LÄNGENMAßE

Größe	LÄNGENMAßE		
	short	normal	long
Wadenstrümpfe A – D		34 – 38	38 – 43
Schenkelstrümpfe A – G Strumpfhose	56 - 62	62 – 71	71 – 82

\*Größe mit RAL - Zertifikat

## Avicenum ANTI-TROMBO Premium (CCL1)

Größe	Der abgemessene Umfang am jeweiligem Punkt		
	b	d	g
<b>S</b>	17 – 20	28 – 34	41 – 54
<b>M</b>	20 – 23	31 – 37	48 – 61
<b>L</b>	23 – 26	34 – 40	55 – 68
<b>XL</b>	26 – 29	37 – 43	62 – 75
<b>XXL</b>	29 – 32	40 – 46	69 – 82

## Avicenum 360 ARM SLEEVE (CCL2) (Armstrumpf)

Größe	Umfang der Hand an den zu messenden Punkten			
	a	c	d	g
<b>S</b>	do 18	16 – 19	22 – 26	24 – 30
<b>M</b>	do 20	19 – 22	26 – 30	30 – 36
<b>L</b>	do 23	22 – 25	30 – 34	36 – 42
<b>XL</b>	do 25	25 – 28	34 – 38	42 – 48

### LÄNGENMAßE

Größe	LÄNGENMAßE	
	normal	long
C – G	do 45	od 45

## Avicenum 70

Größe A-T	
<b>S</b>	158-164/100
<b>S+</b>	158-164/116-124
<b>M</b>	164-170/108
<b>M+</b>	164-170/116-124
<b>L</b>	170-176/108-116
<b>L+</b>	170-176/116-124
<b>XL</b>	176-182/108-116
<b>XL+</b>	176-182/116-124

Größe A-G	
<b>M</b>	25
<b>L</b>	27
<b>XL</b>	29

# Farbpalette Avicenum



0000  
WEISS



3090  
BORDEAUX



5090  
DUNKELBLAU



7001  
SILBERGRAU



7007  
ANTHRAZIT



8000  
HELL



8001  
NATUR



8002  
BRONZE



8003  
SAHARA



8005  
TABAК



8080  
SCHOKO




9999  
SCHWARZ


... für ein leichteres Leben!

**ARIES DEUTSCHLAND GmbH**  
**Martin-Luther-Str. 1**  
**D-95615 Marktredwitz**  
**Germany**  
**Amtsgericht Hof HRB 5356 B**

**T: +49 (0)9231 7909 192**  
**F: +49 (0)9231 7908 696**  
**E: [vertrieb@aries.eu](mailto:vertrieb@aries.eu)**  
**[de.aries.eu](http://de.aries.eu)**

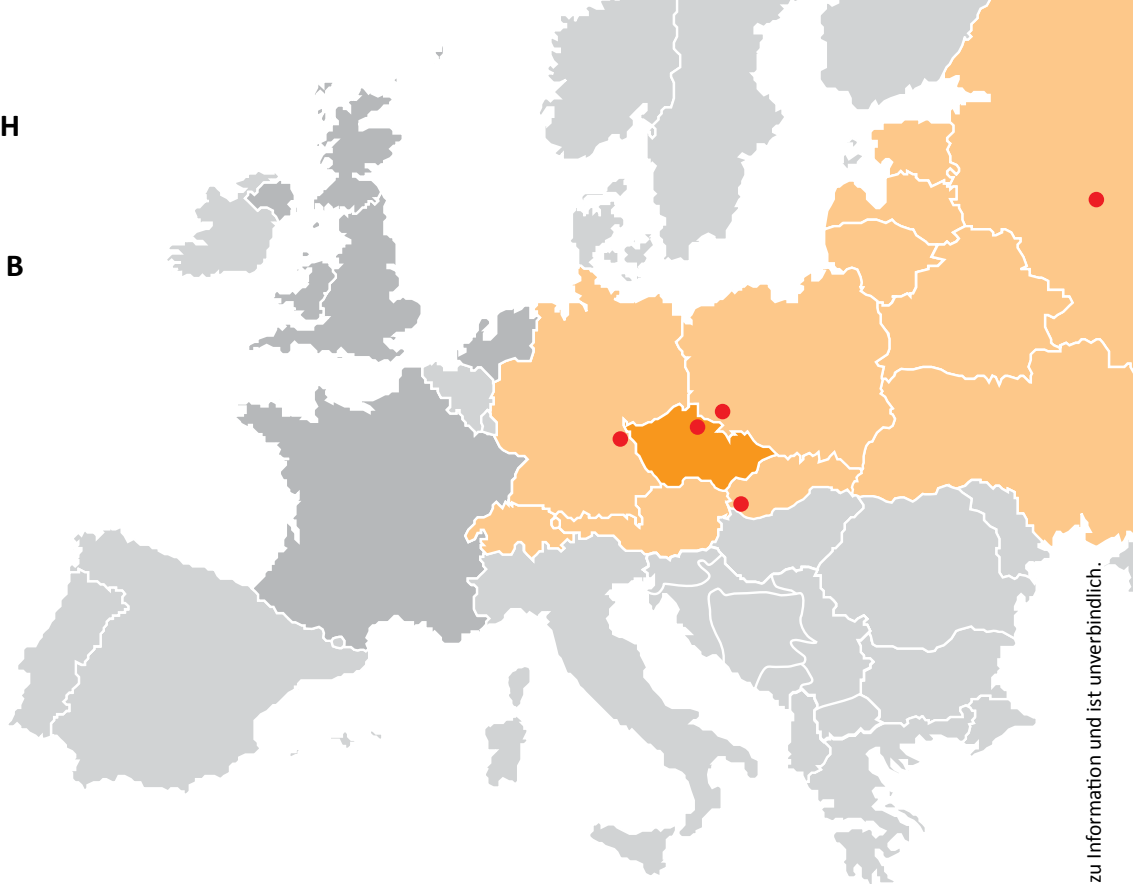

**[www.avicenum.eu](http://www.avicenum.eu)**

 Entwickelt und hergestellt in der Tschechischen Republik.